



Sincronizar el escáner significa...

ENVIAR LOS DATOS DE LOS ESCANEOS REALIZADOS DESDE EL ESCÁNER AL SERVIDOR INTERNACIONAL DE NU SKIN.

BENEFICIOS:

- ✓ En los informes de tu escáner, puedes ver un resumen de toda la actividad de tu escáner.
- ✓ Se realiza una conexión entre los escaneos y los pedidos de la suscripción al ADR.
- ✓ Nu Skin puede pagarte tus bonificaciones del escáner.

S3


PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Sincroniza tu escáner con la aplicación 2.0

- ✓ Después de cada sesión de escaneado,
- ✓ al menos una vez cada 14 días y
- ✓ no más tarde del último día laborable del mes.

Si tu escáner no se ha sincronizado dentro de un período de 14 días, se desactiva automáticamente. Solo puedes hacer otro escaneo tras la nueva sincronización.

Consulta la pestaña “Registros” para ver cuántos días te quedan hasta la siguiente sincronización:

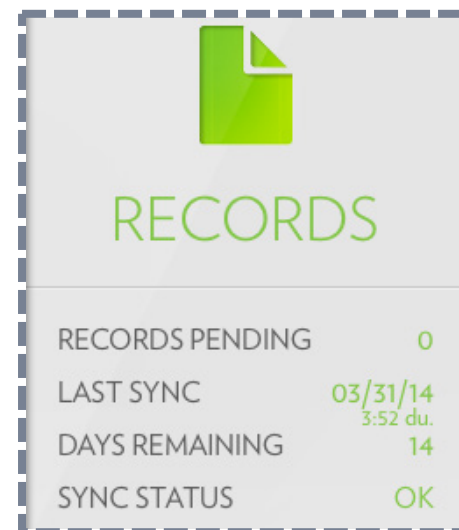

RECORDS PENDING	0
LAST SYNC	03/31/14 3:52 du.
DAYS REMAINING	14
SYNC STATUS	OK

Sincroniza tu escáner con la aplicación 2.0

Tu escáner se sincroniza automáticamente siempre y cuando tu iPad* esté conectado a una red wifi.

- Si el escáner está **sincronizado**, aparecerá como:



- Si **no está sincronizado**, aparecerá como:



- Para sincronizar los escaneos, pulsa el botón:





Sincroniza tu escáner S3 con la aplicación 3.0

Tu escáner se sincroniza automáticamente siempre y cuando tu dispositivo* esté conectado a una red wifi.

Si tus escaneos no se han sincronizado, vuelve a conectar tu dispositivo a una red wifi (como máximo el último día laboral del mes) y todos los escaneos se sincronizarán automáticamente.

** La versión 3.0 de la aplicación del escáner S3 está desarrollada para iPhone y iPad con OS 12 o superior.*

S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

